



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

BRUKSANVISNING

Bariatrisk Stödkäpp

Stark och funktionell stödkäpp till den bariatrisk användaren.

Bariatrisk Stödkäpp är anpassad till användare upp till 270 kg.



Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182.


Innehållsförteckning

1. Säkerhet.....	3
2. Symbolförklaring.....	4
3. Generellt	5
4. Användning.....	5
5. Inställning.....	5
6. Långtidsförvaring	6
7. Rengöring och underhåll	6
8. Bortforsling	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer	8
11. Beställning.....	8

1. Säkerhet

VARNING

Bariatrisk Stödkäpp får inte användas utan en instruktion av utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i hur kryckkäppen används. Vid felaktig användning kan användaren ta skada.

Bruksanvisningen ska läsas noggrant innan Bariatrisk Stödkäpp tas i bruk. Var speciellt uppmärksam vid säkerhetsvägledning markerade med .

Cobi Rehab tar inget ansvar för eventuella skador på produkten eller vid personskador som förorsakats av felaktig användning av Bariatrisk Stödkäpp.

Kontakta Cobi Rehab omgående om Bariatrisk Stödkäpp är skadad eller har konstruktionsfel. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för olämpliga situationer som uppstår efter reparationer som gjorts utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.


SÄKERHETSVÄGLEDNING












Bariatrisk Stödkäpp får endast ställas in av personal eller av personer som fått en instruktion i bruket av stödkäppen. Felaktiga inställningar kan skada användaren.

Bariatrisk Stödkäpp kan ta skada om den används av en användare som väger över 270 kg.

Bariatrisk Stödkäpp får inte användas förrän de två inställningsknapparna för höjdinställning är helt på plats. Det inre röret kan lossna och glida in i det yttre röret om inte inställningsknapparna för höjdinställningen sitter korrekt.

2. Symbolforklaring

Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett.	
	Varning!
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om medicintekniska produkter EU 2017/745
	Cobi Rehab artikelnummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Tillverkare
	Medicinsk utrustning klass 1
	Användarvikt
	Läs manual
CE-etiketten är placerad på stödkäppens rör. Exempel på etikett kan ses nedan.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Walking cane 0200-000-000			270 KG
	0050808		MADE IN TAIWAN	
	2020			

3. Generellt

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om målgruppen för och användningen av Bariatrisk Stödkäpp. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av bruksanvisningen finner du på vår hemsida. Kontrollera alltid att du har den senaste versionen.

Har du behov av en bruksanvisning med större text, finns bruksanvisningen i PDF-format på www.cobirehab.se. Där kan du förstora upp bruksanvisningen i textstorlek.

Kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar mera upplysning om Bariatrisk Stödkäpp.

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varsel.

Bariatrisk Stödkäpp UDI-nummer framgår av etiketten på stödkäppen.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkter kan ses på vår hemsida under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

4. Användning

Bariatrisk Stödkäpp är en extra förstärkt stödkäpp som är speciellt utvecklad till att ge stöd och säkerhet under gång till användare som väger upp till 270 kg.

⚠ Bariatrisk Stödkäpp kan ta skada om den används av personer som väger över 270 kg.

Bariatrisk Stödkäpp används på sjukhus, omsorgsboenden och i privata hem. Bariatrisk Stödkäpp kan användas både inomhus och utomhus.

5. Inställning

Bariatrisk Stödkäpp är utrustad med två inställnings-knappar placerade på käppens rör. Dessa knappar reglerar höjden på käppen.

Före användning ska höjden på stödkäppen justeras genom att trycka in de två inställningsknapparna.

⚠ Bariatrisk Stödkäpp får inte användas om inställningsknapparna inte är helt på plats.

Rådfråga alltid en förskrivare innan Bariatrisk Stödkäpp rekommenderas till en användare.

Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer förknippade med bruket av Bariatrisk Stödkäpp.

Det inre röret kan lossna om inte knapparna för höjdställningen sitter korrekt. Det kan få till följd att det inre röret glider in i det yttre röret.

6. Långtidsförvaring

Bariatrisk Stödkäpp bör förvaras mörkt och i en temperatur mellan -10° - 50° C.

7. Rengöring och underhåll

Bariatrisk Stödkäpp kan rengöras med vatten och vanligt rengöringsmedel.

Inställningslåset till höjdinställningen ska regelbundet kontrolleras och bytas ut om det är nödvändigt.

⚠ Brist på kontroll av låsknappen till höjdinställningen kan förorsaka funktionsfel.

Desinficering

Bariatrisk Stödkäpp kan desinficeras med ytdesinfektion 70% eller med en klorprodukt 1000-1200 ppm.

⚠ Desinficera alltid Bariatrisk Stödkäpp innan den ska användas av en ny person för att undvika korskontaminering.

Eventuella lokala rutiner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

8. Bortforsling

När Bariatrisk Stödkäpp inte längre används ska den bortforslas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information kring bortforsling.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterar att Bariatrisk Stödkäpp är felfri när den levereras. Skulle den mot förmodan vara felaktig eller skadad vid leverans, kontakta Cobi Rehab omgående.

Garantiperioden för Bariatrisk Stödkäpp är ett år från dagen för köpet och täcker produktionsfel eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller ej:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller är väsentligt skadat.
- produkter som har reparerats av ej auktoriserad personal.

Garantin omfattar ej:

- slitagedelar.

Garantin gäller ej i de fall Cobi Rehab bedömer att Bariatrisk Stödkäpp blivit felaktigt hanterad och på ett olämpligt sätt.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både service och reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av någon art.

⚠ Brist på underhåll kan skada Bariatrisk Stödkäpp, förkorta livslängden eller påverka stödkäppens prestanda.

9.1 Oförutsedda händelser

Varje oförutsedd händelse som inträffar vid bruk av stödkäppen ska rapporteras till Cobi Rehab.

9.2 Efter förväntad livslängd

Efter den förväntade livslängden är det viktigt att det görs en bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet av produkten, då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten är använd och hur sliten den är.

Den samlade värderingen av produkten ska göras av utbildad personal såsom förskrivare eller hjälpmedelskonsulent. Som ett minimum ska det bedömas hur produkten är använd, produktens tillstånd och produktens samtliga komponenter.

Cobi Rehab kan alltid göra en sådan värdering.

10. Specifikationer

Max användarvikt	270 kg
Höjjusterbar	71-93 cm
Vikt	0,9 kg
Reflex	Ja
Material	Krom Molybden stål
Grepp	Termoplast
ISO - klassifikation	ISO 12 03 03 - 05
Produktens förväntade livslängd	7 år
Riskklass	I
UDI-DI	5740000102810
Grundläggande UDI	5740000100010MV
Yttemperaturen på Bariatrisk Stödkäpp kan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla och värme.	

11. Beställning

Modell	Artikelnummer
Bariatrisk stödkäpp	0200-000-000



COBI REHAB[®]

The Positioning Company



TILLVERKARE

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com

LEVERANTÖR

Cobi Rehab
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
Sverige
08-702 97 74

www.cobirehab.se