



Bremse og sætte farten ned

Tryk mindre på håndtaget for at sænke farten. Slip det for at sænke farten helt. Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når der ikke trykkes på håndtaget.



Frigear/kørsel uden motorhjælp

Tryk det sorte frigear-håndtag ned på begge hjul (se billede til højre).

⚠ Når motoren er i frigear, kan systemet ikke benyttes. Joysticket blinker, hvis systemet tændes i frigear.

Bring motoren ud af frigear ved at skubbe håndtag på begge hjul op. Nu aktiveres parkeringsbremsen automatisk. **Sluk for systemet, og tænd det igen.**

Kørestolen er nu klar til brug.


Transport i motoriseret køretøj

⚠ Bruger må kun sidde i kørestolen under transport, hvis der sidder et "Godkendt-til-transport-med-bruger" klistermærke på kørestolen (Se billede herunder).



⚠ Kørestolen må aldrig sættes i frigear under transport i motoriseret køretøj.

⚠ Systemet skal slukkes under transport!

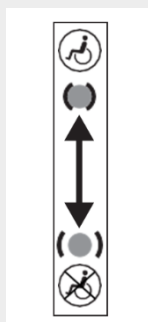

Håndtag i opadvendt position:

Parkeringsbremse aktiveret.

Håndtag i nedadvendt position:

Friløb aktiveret (se billede ovenover).

Redigeret 09-2022.

QUICK GUIDE

Indbygningsmotor til Kelvin Komfortkørestol

Ny og forbedret version

Opladning

Sæt opladerstikket i kørestolens stik (placeret på bagsiden af joysticket). Tilslut opladerstikket til en stikkontakt.

⚠ Opladeren må ikke efterlades tændt uden opsyn. Batteriet må derfor ikke oplades natten over.

Start/Sluk/Kørsel med joystick

Når joysticket er tændt, ses batterikapaciteten øverst på displayet. Oplad kørestolen, når kapaciteten er i det røde felt.

Nederst på displayet ses de tre kørselstyper i talform. Skift mellem dem med *Profile* knappen:

- 1 Manøvre (Langsom)
- 2 Indendørs (Mellem hastighed)
- 3 Udendørs (Hurtigst)

Kontakt Cobi Rehab for individuelle hastighedsindstillinger.

Kørsel fremad med motorhjælp

Tænd for systemet. Vælg ønskede hastighed (1-3).

⚠ Jo længere styrepinden trykkes fremad, jo hurtigere kører kørestolen.

Tryk styrepinden til højre eller venstre for at vende eller dreje.

Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når der ikke trykkes på styrepinden.

Kørsel baglæns med motorhjælp

Når styrepinden trækkes tilbage, kører kørestolen langsomt baglæns.

