




BRUGERVEJLEDNING

Badetoiletstol med drivhjul

Stærk og bred badetoiletstol med drivhjul, der bidrager til større selvstændighed for brugeren. Justerbare fodstøtter, så brugere med meget væv på lårene kan sidde komfortabelt.

Badetoiletstol med drivhjul bruges på plejecentre, institutioner og hospitaler. Maks. brugervægt 325 kg.

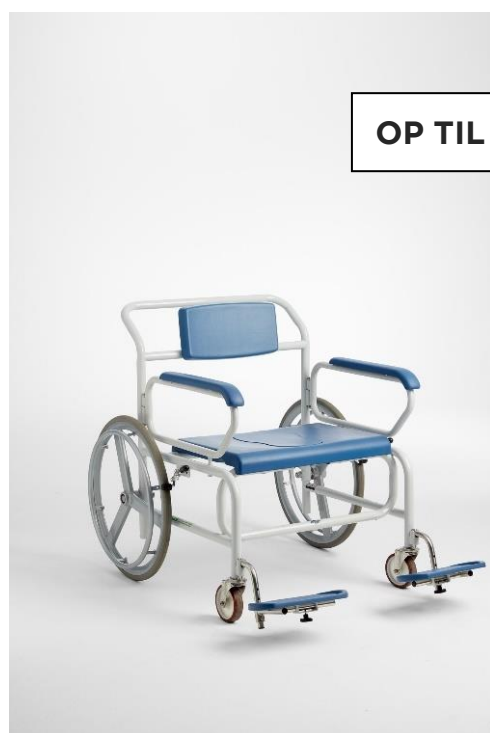

- Sikrer bedre arbejdsmiljø for plejer og en behagelig og sikker badeoplevelse for bruger.
- Mulighed for butterfly armlæn, der giver ekstra bredde mellem armlæn.
- Fås i to størrelser, 61 cm og 71 cm.
- Bremses påsat begge drivhjul.
- Drivhjul sikrer større selvstændighed for bruger.
- Ekstra lange armlæn og flere typer af benstøtter.



Scan koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Indhold

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaring.....	4
3. Generelt	5
4. Anvendelse.....	5
5. Ibrugtagning	6
6. Vedligeholdelse og rengøring.....	7
7. Transport og opbevaring	7
8. Genanvendelse og bortskaffelse.....	8
9. Garanti.....	8
10. Specifikationer	9
11. Tilbehør og reservedele.....	10

1. Sikkerhed



ADVARSEL

Badetoiletstol med drivhjul må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af badetoiletstol. Ved forkert betjening kan brugeren komme til skade.

Bruges Badetoiletstol med drivhjul til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt på 325 kg, øges risikoen for at beskadige Badetoiletstol med drivhjul.

Brugsanvisningen skal læses grundigt, før Badetoiletstol med drivhjul tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af Badetoiletstol med drivhjul.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.



SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

Symbolet i denne brugervejledning markerer en sikkerhedsvejledning. Sikkerhedsvejledninger skal følges nøje.

Brugere uden stand og gangfunktion skal altid liftes ind og ud af Badetoiletstol med drivhjul.

Badetoiletstol med drivhjul har en brugervægt på 325 kg.

Overfladetemperaturen kan stige, når Badetoiletstol med drivhjul udsættes for eksterne varmekilder, fx sollys.

Badetoiletstol med drivhjul kan på grund af dens store bredde have vanskeligt ved at passere gennem almindelige døre og nødudgange.

Badetoiletstol med drivhjul må kun anvendes på plant, hårdt gulv med en maksimal hældning på 3°, da der ellers er risiko for tipning.

Sørg altid for, at begge hjul er bremset, når brugeren flyttes til og fra badetoiletstolen, og når brugeren sidder i badetoiletstolen.




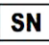





Brug ikke Badetoiletstol med drivhjul, før begge armlæn er monteret. Brugere kan falde ud til siden uden armlæn.












Manglende overholdelse af eftersyn af bolte kan medføre fejlfunktion.

Desinficer altid Badetoiletstol med drivhjul, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

2. Symbolforklaring

Følgende symboler findes i brugervejledningen eller på labelen.

	Vær opmærksom!
	Overensstemmelseserklæring ifølge Direktivet for medicinsk udstyr
IPX4	Modstandsdygtighed i forhold til vand
	Cobi varenummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
	Medicinsk udstyr
	Max. brugervægt
	Læs manual
<p>CE-Label er placeret på siden af stellet.</p> <p>Eksempel på CE-label ses nedenfor.</p>	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	Shower commode wheel, 61cm 0152-061-000			325 KG
	0050821		MADE IN TAIWAN	
	2020			

3. Generelt

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Badetoiletstol med drivhjul og målgruppen for Badetoiletstol med drivhjul. Den indeholder også en lang række specifikationer på Badetoiletstol med drivhjul.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes brugervejledningen i PDF-form på [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Badetoiletstol med drivhjul.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

UDI-nummer på Badetoiletstol med drivhjul fremgår af labelen, som er placeret på siden af stellet.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>


4. Anvendelse

Badetoiletstol med drivhjul er designet til den bariatriske bruger i forbindelse med forflytning til og fra badeværelset, i brusebadet og ved toiletbesøg.

Badetoiletstol med drivhjul kan være med til at øge brugers selvstændighed.


Badetoiletstol med drivhjul er beregnet til indendørs brug på fx hospitaler, plejecentre og institutioner.

Badetoiletstol med drivhjul er beregnet til brugere op til 325 kg med nedsat fysisk funktionsevne.

 Badetoiletstol med drivhjul er ikke beregnet til at køre over forhindringer som dørtrin etc. Badetoiletstol med drivhjul må kun køres på plant, hårdt underlag for at undgå risikoen for tipning.

Den tilsigtede operatør af Badetoiletstol med drivhjul er en sundhedsuddannet fagperson, fx en terapeut, sygeplejerske eller en sosu-assistent.

Badetoiletstol med drivhjul kan bruges i omgivelser med en temperatur fra -10 - 40°C og i en luftfugtighed mellem 20-80%.

 Badetoiletstolen må ikke anvendes i saltholdigt miljø (svømmebassin eller svømmehal) eller i stærkt syreholdige eller basiske miljøer.


Kontraindikationer


Brugere med nedsat kognitive funktionsevner skal overvåges under brugen af Badetoiletstol med drivhjul.

5. Ibrugtagning

Før brug

Armlænene skal være korrekt monteret i hullerne på siden af Badetoiletstol med drivhjul.


 Brug ikke Badetoiletstol med drivhjul, før begge armlæn er monteret. Bruger kan falde ud til siden uden armlæn.

 Vær opmærksom på, at sædet er korrekt monteret på badetoiletstolens sæderamme.



Badetoiletstol med drivhjul og butterfly armlæn.


I brug

 Bruger må ikke anvende fodstøtterne til at stå på eller som trin under forflytning, da dette kan medføre risiko for tipning.

Risiko for klemning

- Hvis armlænene sættes på plads, når brugeren sidder i badetoiletstolen, kan der opstå klemmerisiko mellem armlæn og siden af stolen.

- Klemning af fingre og andre dele af kroppen kan ske mellem badetoiletstolens sæderamme og toiletkumme eller bækken. Udvis derfor altid stor forsigtighed, når badetoiletstolen køres ind over toilet, eller når bækken sættes ind under sædet.

 Sørg altid for, at begge drivhjul er bremsset, når brugeren flyttes til og fra badetoiletstolen, og når brugeren sidder i badetoiletstolen.



Helt sæde med låg til bækkenspanden.



Bækkenspanden er nem at indsætte og tømme.

6. Vedligeholdelse og rengøring

Badetoiletstolens stel, sæde og armlæn skal efter brug vaskes i kalk- og saltneutralt vand med et almindeligt rengøringsmiddel og efterfølgende tørres af.

! Badetoiletstolen må ikke anvendes i saltholdigt miljø (svømmebassin eller svømmehal) eller i stærkt syreholdige eller basiske miljøer.

Sædet kan fjernes og desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Eventuelle lokale procedurer omkring rengøring og vedligeholdelse skal altid overholdes.

Bolte og låsemøtrikker skal jævnligt efterses og evt. efterspændes.

! Manglende overholdelse af eftersyn af bolte kan medføre fejlfunktion.

! Desinficer altid Badetoiletstol med drivhjul, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

7. Transport og opbevaring

Når Badetoiletstol med drivhjul ikke er i brug, bør den opbevares tørt og mellem -10 - 40°C.

Badetoiletstol med drivhjul er (uden bruger) egnet til land- og/eller lufttransport. Badetoiletstol med drivhjul kan ikke klappes sammen, da rammen er fast.

For at undgå skader på fx ryg, frarådes det, at plejepersonale bærer den 33 kg tunge badetoiletstol. Badetoiletstol med drivhjul tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres i motoriseret køretøj.

7.1 Langtidsopbevaring

Ved langtidsopbevaring (over tre måneder) af Badetoiletstol med drivhjul bør den opbevares i mellem -10 - 40° og i en luftfugtighed, der ikke overstiger 80%.



Badetoiletstol med drivhjul med butterfly armlæn.



Parkeringsbremser på begge drivhjul kan aktiveres af både bruger og personale.

8. Genanvendelse og bortskaffelse

Produkter, der ikke længere er i brug, bortskaffes på miljøforsvarlig vis. Kontakt evt. kommunen for yderligere information om bortskaffelse.

Kontakt Cobi Rehab for mere information om genanvendelse af Badetoiletstol med drivhjul.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterer, at Badetoiletstol med drivhjul er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på Badetoiletstol med drivhjul ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Badetoiletstol med drivhjul er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt.


- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale.

Garantien omfatter ikke:

- sliddele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Badetoiletstol med drivhjul er blevet håndteret på en uhensigtsmæssig måde eller anvendt i saltholdige, syreholdige eller basiske miljøer.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres både service og anvendte reservedele.

 Mangel på vedligeholdelse kan skade Badetoiletstol med drivhjul, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Badetoiletstol med drivhjuls ydeevne.

9.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af Badetoiletstol med drivhjul, skal indberettes til Cobi Rehab.

9.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi Rehab ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi Rehab ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

10. Specifikationer

Maks. brugervægt	325 kg
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI DI	5740000100004NZ
Forventet holdbarhed	7 år
Totallængde	1290 mm
Sædebredde med standard armlæn	610/710 mm
Totalbredde med standard armlæn (uden fodstøtter)	810/910 mm
Sædebredde butterfly armlæn	750/850 mm
Totalbredde med butterfly armlæn (uden fodstøtter)	870/970 mm
Sædedybde	560 mm
Sædehøjde	550 mm
Armlænsbredde	60 mm
Breddetoiletåbning	Ø 240 mm, 350 mm lang
Afstand fra gulv til undersiden af sæde	445 mm
Afstand fra gulv til skubbebøjle	1000 mm
Afstand fra sæde til ryggens øverste kant	450 mm
Afstand fra sæde til fodstøtter	400/420/440/460/480 mm
Samlet vægt (model 61 cm/71 cm)	33 kg
Svingbare armlæn	Ja
Fodstøtter svingbare og højdeindstillelige	Ja
Fodstøttebelægning	PU-skum
Hjul med parkeringsbremse	Ja, 2 styks.
Venderadius	1580 mm
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Hjul	Ø125 mm, faste, 2. styks.
Drivhjul	24" faste, punkterfrie, 2 styks.
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
IP-klassifikation	IPX4
ISO-klassifikation	09 12 03 24
Risikovurdering	EN/ISO 14971:2012
Generelle krav og prøvningsmetoder	EN 12181

11. Tilbehør og reservedele

Tilbehør	Varenummer
Butterfly armlæn højre (giver 7 cm ekstra bredde mellem armlænet)	0150-999-012R
Butterfly armlæn venstre (giver 7 cm ekstra bredde mellem armlænet)	0150-999-012L
Sæde helt med låg til badetoiletstol, 61 cm	0150-999-022
Sæde helt med låg til badetoiletstol, 71 cm	0150-999-023
Bækkenspand med låg plast	0140-999-001
Fodstøtte standard badetoiletstol højre	0150-999-008
Fodstøtte standard badetoiletstol venstre	0150-999-009
Lateral benstøtte til badetoiletstol højre	0156-999-030
Lateral benstøtte til badetoiletstol venstre	0156-999-031



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



FORHANDLER OG FABRIKANT

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522

cobirehab.com