



**GEBRAUCHSANLEITUNG**

# Tilt Dusch- und Toilettenstuhl

**Der weltweit erste Dusch- und Toilettenstuhl, der den bariatrischen Benutzer bis zu einer Neigung von 30° neigt. Ein durchdachter und sicherer Kombistuhl, der sowohl den Benutzer als auch die Pflegekraft in jeder Badesituation unterstützt.**

Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl wird in Pflegeheimen, Einrichtungen und Krankenhäusern eingesetzt. Benutzergewicht 325 kg



**BIS ZU 325 KG**



- Bremsen an allen vier Rädern.
- Option für extra breite Butterfly-Armlehnen.
- Die Fernbedienung ermöglicht dem Pflegepersonal einen einfachen Zugriff auf die Neigefunktion.
- Sorgt für eine bessere Arbeitsumgebung für das Pflegepersonal und für ein angenehmes und sicheres Baderlebnis für den Benutzer.
- Sitzhöhe und Sitztiefe verstellbar.
- Verschiedene Arten von Beinstützen.



Scannen Sie den Code und finden Sie das Produkt auf unserer Website.



Cobi Rehab und seine Lieferanten halten alle Vorgaben gemäß der UN-Konvention zu Kinder- und Zwangsarbeit sowie die ILO-Übereinkommen 029, C132 und C182 ein.

# Inhalt

1. Sicherheit .....	3
2. Symbolerklärung .....	4
3. Allgemeines .....	5
4. Verwendung .....	5
5. Inbetriebnahme .....	6
6. Aufladen und Betrieb .....	7
7. Betriebliche Störungen .....	8
8. Instandhaltung und Reinigung .....	9
9. Transport und Aufbewahrung .....	9
10. Wiederverwertung und Entsorgung .....	10
11. Garantie .....	10
12. Spezifikationen .....	11
13. Zubehör und Ersatzteile .....	12

# 1. Sicherheit


---



## WARNUNG

Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl darf nicht ohne gründliche Einweisung durch geschultes Personal oder durch Personen, die im Umgang mit dem Tilt Dusch- und Toilettenstuhl unterwiesen wurden, benutzt werden. Durch eine falsche Bedienung kann der Benutzer zu Schaden kommen.

Wenn der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl für Personen benutzt wird, die mehr als das maximale Benutzergewicht von 325 kg wiegen, erhöht sich das Risiko einer Beschädigung des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls.

Die Gebrauchsanleitung muss vor der Benutzung des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls sorgfältig gelesen werden. Beachten Sie insbesondere die mit  gekennzeichneten Sicherheitshinweise.


Cobi Rehab übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder für Personenschäden, die durch eine falsche Installation, eine falsche Montage oder einen unsachgemäßen Gebrauch des Cobi Tilt Dusch- und Toilettenstuhls verursacht werden.

Kontaktieren Sie Cobi Rehab umgehend, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen. Verwenden Sie niemals eigene Ersatzteile.

Cobi Rehab kann nicht für Fehler oder Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch Reparaturen entstehen, die ohne die schriftliche Genehmigung von Cobi Rehab durchgeführt werden.



## SICHERHEITSHINWEISE

Das Symbol  in dieser Gebrauchsanleitung weist auf einen Sicherheitshinweis hin. Die Sicherheitshinweise müssen unbedingt beachtet werden.

Benutzer, die nicht in der Lage sind zu stehen oder zu gehen, müssen immer in den und aus dem Tilt Dusch- und Toilettenstuhl gehoben werden.

Verwenden Sie die Neigefunktion immer vorsichtig, um Stöße zu vermeiden.






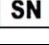





Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl ist für ein Benutzergewicht von maximal 325 kg ausgerichtet.


Die Oberflächentemperatur kann ansteigen, wenn der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl externen Wärmequellen, wie z. B. Sonnenlicht, ausgesetzt wird.

Aufgrund seiner großen Breite kann es Schwierigkeiten bereiten, mit dem Tilt Dusch- und Toilettenstuhl normale Türen und Notausgänge zu passieren.

Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl darf nur auf einem ebenen, harten Boden mit einer maximalen Neigung von 3° verwendet werden, da sonst Kippgefahr besteht.

## 2. Symbolerklärung

	Bitte beachten Sie:
	Doppelt isoliert (Klasse II)
	Konformitätserklärung entsprechend Verordnung über Medizinprodukte
IP44	Spritzwassergeschützt
	Zu entsorgen über die ordnungsgemäße Abfallentsorgung
	Cobi-Artikelnummer
	Seriennummer
	Produktionsjahr
	Hersteller
	Medizinprodukt
	Maximales Benutzergewicht
	Konsultieren Sie die Gebrauchsanleitung
<p>Die CE-Kennzeichnung befindet sich an der Seite des Rahmens.</p> <p>Ein Beispiel für das CE-Kennzeichen ist unten abgebildet.</p>	

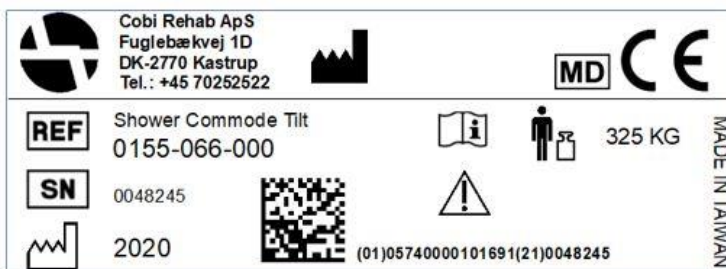

## 3. Allgemeines

---

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen über den Gebrauch des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls sowie die Zielgruppe für den Tilt Dusch- und Toilettenstuhl. Sie umfasst zudem eine breite Palette von Spezifikationen zum Tilt Dusch- und Toilettenstuhl.

Die aktuellste Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie auf unserer Website. Prüfen Sie, ob die jetzt vorliegende Version die neueste ist.

Wenn Sie eine Gebrauchsanleitung in einer größeren Schriftgröße benötigen, steht Ihnen das Produktblatt im PDF-Format auf [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com) zur Verfügung, bei dem die Schriftgröße skalierbar ist.

Wenn Sie weitere Informationen über den Tilt Dusch- und Toilettenstuhl wünschen, können Sie

sich jederzeit an Cobi Rehab unter der Telefonnummer +45 7025 2522 wenden.

Cobi Rehab behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die UDI-Nummer des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls wird auf dem Etikett angegeben, das sich an der Seite des Rahmens befindet.


Produktsicherheitshinweise und Produktrückrufe finden Sie auf der Website unter <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

## 4. Verwendung

---

Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl ist für den Einsatz im Innenbereich, z. B. in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen, vorgesehen.

Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl ist für Benutzer mit eingeschränkten Fähigkeiten bis zu einem Körpergewicht von 325 kg ausgelegt.

 Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl ist nicht zum Überfahren von Hindernissen wie z. B. Türschwellen etc. bestimmt. Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl sollte nur auf ebenem, hartem Untergrund gefahren werden, um die Gefahr des Umkippens zu vermeiden.

Der vorgesehene Bediener des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls ist eine medizinische Fachkraft, wie

z. B. ein Therapeut, eine Pflegefachperson oder ein Pflegehelfer.

Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl kann in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0°C und +40°C und einer Luftfeuchtigkeit von 20-80% eingesetzt werden.

 Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl darf nicht in salzhaltigen Umgebungen (Schwimmbecken oder Schwimmhalle) oder in stark säurehaltigen oder basischen Umgebungen verwendet werden.

### Kontraindikationen

Benutzer mit kognitiven Einschränkungen müssen während der Benutzung des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls beaufsichtigt werden.

# 5. Inbetriebnahme

## Vor der Verwendung

Die Armlehnen müssen korrekt in die Löcher an der Seite des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls montiert werden.


Die Fußplatten können stufenweise in der Breite verstellt werden. Die Arretierschrauben unter den Fußplatten müssen immer korrekt in den Bohrungen der Fußstützen montiert sein.

Die Arretierschrauben dürfen nicht außerhalb der Bohrungen in der Fußstütze angezogen werden.

Stellen Sie sicher, dass der Sitz korrekt auf dem Sitzrahmen des Dusch- und Toilettenstuhls montiert ist.

Benutzen Sie den Tilt Dusch- und Toilettenstuhl erst dann, wenn beide Armlehnen montiert sind. Ohne Armlehnen kann der Benutzer zur Seite hin herausfallen.

## Während dem Gebrauch

 Der Benutzer darf die Fußstützen während der Beförderung nicht zum Aufstehen oder als Trittstufen benutzen, da dies eine Kippgefahr darstellt.

### Gefahr des Einklemmens

- Wenn die Armlehnen aufgesetzt werden, während der Benutzer auf dem Dusch- und Toilettenstuhl mit Antriebsrädern sitzt, besteht zwischen der Armlehne und der Seite des Stuhls ein Einklemmrisiko.
- Wenn die Arretierschrauben nicht korrekt in die Bohrungen der Fußstützen eingesetzt sind, besteht die Gefahr, dass die Füße zwischen den Fußplatten eingeklemmt werden.
- Es besteht die Gefahr, dass Finger und anderen Körperteile zwischen dem Sitzrahmen des Dusch- und Toilettenstuhls mit Antriebsrädern und der Toilettenschüssel oder dem Steckbecken eingeklemmt werden. Lassen Sie deshalb immer große Vorsicht walten, wenn der Dusch- und Toilettenstuhl mit Antriebsrädern über die Toilette gefahren wird und wenn das Steckbecken unter den Sitz geschoben wird.
- Wenn sich der Sitz in seiner höchsten Position befindet, besteht die Gefahr, dass die Hände des Helfers zwischen Lenker und Sitzrahmen eingeklemmt werden.




Tilt erleichtert den Pflegekräften die Durchführung der täglichen Hygiene, Haut- und Gewebepflege.



Tilt ist eine einzigartige Kombination aus einem Toilettenstuhl und einem Duschstuhl.



 Stellen Sie immer sicher, dass mindestens zwei Räder gebremst sind, während der Benutzer auf den oder vom Dusch- und Toilettenstuhl gehoben wird und während der Benutzer im Dusch- und Toilettenstuhl sitzt.

Beim Transport mit dem Benutzer muss der Sitz des Dusch- und Toilettenstuhls auf die niedrigste Stufe abgesenkt sein, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der Stuhl kippt.

# 6. Aufladen und Betrieb

## 6.1 Vorbereitung

1. Legen Sie den Akku in das Ladegerät ein. Wenn der Akku im Ladegerät gedreht wird, wird er automatisch von zwei Magneten an der Unterseite des Ladegeräts in Position gezogen.

2. Verbinden Sie das Ladegerät und den Stecker miteinander und stecken Sie es in die Steckdose. Die LED am Stecker leuchtet während des Ladevorgangs rot. Die LED leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

3. Entfernen Sie den Akku, indem Sie ihn in Pfeilrichtung drehen.

4. Setzen Sie den Akku in die am Schiebebügel hängende Steuereinheit ein. Wenn der Akku richtig eingesetzt ist, ertönt ein Signalton von der Steuereinheit.

Laden Sie den Tilt Dusch- und Toilettenstuhl nach dem Gebrauch immer auf.

### Aktoren

Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl ist mit zwei Aktoren ausgestattet, die unter dem Sitz montiert sind. Diese beiden Aktoren ermöglichen das Neigen des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls.

Die beiden Aktoren müssen vor der ersten Benutzung des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls kalibriert werden.

### Nullpunktkalibrierung

Kalibrieren bedeutet, eine Messung vorzunehmen und dann ein Objekt (z. B. einen Aktor) auf ein bestimmtes Maß einzustellen. Durch die Kalibrierung der beiden Aktoren des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls bewegen sich diese auf jeder Seite des Dusch- und Toilettenstuhls synchron auf und ab.

Eine manuelle Nullpunktkalibrierung wird über die Fernbedienung durchgeführt:

1. Drücken Sie die Taste „Pfeil nach unten“ ca. 20 Sekunden lang, bis ein mechanisches Motorgeräusch aus der Steuereinheit zu hören ist.

2. Lassen Sie die Taste los, wenn sich der Sitz in der unteren Position befindet. Die beiden Aktoren sind nun kalibriert.

Die Neigung muss ebenfalls nullpunktkalibriert werden bei:



1. Akkuwechsel.
2. Inbetriebnahme des Stuhls, nachdem er lange Zeit nicht benutzt wurde.
3. Betrieblichen Störungen.

### Niedriger Akkustand

Der Akku gibt fünf kurze Summtöne ab, wenn der Akkustand zu niedrig ist, damit die Aktoren runter- und hochfahren können. Bei niedrigem Akkustand können die Aktoren nur noch runterfahren.

Laden Sie den Tilt Dusch- und Toilettenstuhl auf.

### Leerer Akku


Der Akku gibt einen Summton ab, wenn er leer ist. Nach dem Summton stoppen die Aktoren sofort und die Steuereinheit hört auf zu arbeiten.

Warten Sie mindestens eine Minute, bevor Sie einen neuen Akku einlegen. Denken Sie daran, die Aktoren nach einem Akkuwechsel zu kalibrieren.

### Starke Beanspruchung des Akkus

Wenn der Akku durch häufig aufeinanderfolgendes Hoch- und Runterfahren stark belastet wird, kann der Akku zu heiß werden, wodurch der Sicherheitsthermostat in des Akkus aktiviert wird.

Dies bedeutet, dass die Steuereinheit nicht mehr funktioniert. Der Akku muss mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor er wieder verwendet werden kann.

 Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl entlädt sich langsam, wenn er nicht benutzt wird. Der Akku gibt keinen „Leerer Akku“-Alarm ab, wenn der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl nicht benutzt wird. Halten Sie also immer einen geladenen Akku bereit.



## 7. Betriebliche Störungen

---

Wenn auf den Piepton (beim Einlegen des Akkus in die Steuereinheit) zwei lange Summtöne folgen, bedeutet dies, dass die Aktoren eine Nullpunktkalibrierung benötigen. Siehe Abschnitt „Nullpunktkalibrierung“ auf der vorherigen Seite.

Fünf kurze Summtöne bedeuten, dass der Akku geladen werden muss und die Aktoren deshalb nicht funktionieren.

Beide Summtöne ertönen, wenn sowohl eine Kalibrierung als auch ein Akkuwechsel erforderlich sind.

Halten Sie immer einen geladenen Ersatzakku bereit, um einen möglichen Ausfall zu vermeiden.

Warten Sie nach dem Anhalten der Aktoren immer mindestens zwei Sekunden, bis Sie den Akku entfernen. Denken Sie daran, die Aktoren nach einem Akkuwechsel zu kalibrieren. Siehe Abschnitt Nullpunktkalibrierung.



### 7.1 Kalibrierung von Aktoren mit der Fernsteuerung

Im Fall einer Betriebsstörung ist es wichtig, den korrekten Sitz aller Stecker der Steuereinheit und der Fernbedienung sowie zwischen Akku und Steuereinheit zu überprüfen.

Wenn die Aktoren trotz geladenem Akku nicht laufen, muss am Tilt Dusch- und Toilettenstuhl eine Nullpunktkalibrierung durchgeführt werden.

#### Nullpunktkalibrierung

Eine manuelle Nullpunktkalibrierung wird über die Fernbedienung durchgeführt:

1. Drücken Sie die Taste „Pfeil nach unten“ ca. 20 Sekunden lang, bis ein mechanisches Motorgeräusch aus der Steuereinheit zu hören ist.
2. Lassen Sie die Taste los, wenn sich der Sitz in der unteren Position befindet. Die beiden Aktoren sind nun kalibriert.






## 8. Instandhaltung und Reinigung

---

Das Gestell, der Sitz und die Armlehnen des Tilt Dusch- und Toilettenstuhl müssen nach Gebrauch mit kalk- und salzneutralen Wasser und einem gewöhnlichen Reinigungsmittel gewaschen und anschließend abgetrocknet werden.

 Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl darf nicht in salzhaltigen Umgebungen (Schwimmbecken oder Schwimmhalle) oder in stark säurehaltigen oder basischen Umgebungen verwendet werden.

### Desinfektion

Der Sitz kann entfernt und mit Ethanol (70–85%) oder einem chlorhaltigen Produkt mit einer Chlorkonzentration von mindestens 1000 ppm bis maximal 10000 ppm desinfiziert werden.

Fernbedienung und Steuereinheit können entfernt und mit Ethanol (70–85%) oder einem chlorhaltigen Produkt mit einer Chlorkonzentration von mindestens 1000 ppm bis maximal 10000 ppm desinfiziert werden.

### Schrauben

Schrauben und Sicherungsmuttern müssen regelmäßig geprüft und ggf. nachgezogen werden.

Wenn die Schrauben nicht geprüft werden, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

### Umgang mit den Akkus

Verwenden Sie immer Akkus, die in gutem Zustand und vollgeladen sind, wenn Sie sie in die Steuereinheit einlegen.

Die Lebensdauer des Akkus kann durch Laden des Akkus verlängert werden, auch wenn er nicht vollständig entladen ist.

Wenn die Steuereinheit über einen längeren Zeitraum (Tage und Wochen) nicht benutzt wird, sollte der Akku aus der Steuereinheit entfernt werden, um eine Tiefentladung zu vermeiden, die den Akku dauerhaft beschädigen kann.

## 9. Transport und Aufbewahrung

---

Bei Nichtgebrauch sollte der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen -10°C und +40°C aufbewahrt werden.

Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl ist (ohne Benutzer) für den Land- und/oder Lufttransport geeignet. Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl kann nicht zusammengeklappt werden, da der Rahmen fest ist.

Um z. B. Rückenverletzungen zu vermeiden, wird davon abgeraten, dass Pflegekräfte den 39 kg schweren Dusch- und Toilettenstuhl tragen. Der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl kann am Rahmen hochgehoben werden, wenn er ohne den darin sitzenden Benutzer in einem motorisierten Fahrzeug transportiert werden soll.

### 9.1 Langfristige Aufbewahrung

Bei langfristiger Aufbewahrung (mehr als drei Monate) sollte der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl bei Temperaturen zwischen 0°C und +40°C und bei einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80% aufbewahrt werden.

Der Akku sollte vor Beginn der Aufbewahrung 40 bis 60% geladen sein.

Wenn der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl nach langfristiger Aufbewahrung wieder benutzt wird, muss er an die Steckdose angeschlossen und mindestens zehn Stunden lang aufgeladen werden.

Behalten Sie die Akkukapazität im Auge, da sich der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl mit der Zeit entlädt.

## 10. Wiederverwertung und Entsorgung

---

Produkte, die nicht mehr verwendet werden, sollten umweltgerecht entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Cobi Rehab oder die Gemeinde, um weitere Informationen zur Entsorgung zu erhalten.

Kontaktieren Sie Cobi Rehab für weitere Informationen über die Wiederverwertung von Lithium-Batterien und Teilen des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls.

## 11. Garantie

---

Cobi Rehab garantiert, dass der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl zum Zeitpunkt der Lieferung frei ist von Mängeln. Sollte der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl zum Zeitpunkt der Lieferung wider Erwarten Mängel aufweisen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Cobi Rehab.

Die Garantiezeit für den Tilt Dusch- und Toilettenstuhl beträgt ab Kaufdatum ein Jahr und deckt Fabrikationsfehler oder Mängel zum Zeitpunkt der Lieferung ab. Die Rechnung dient als Garantienachweis.

Die Garantie gilt nicht:  
- für Produkte, bei denen die Seriennummer, Chargennummer o. ä. entfernt oder wesentlich beschädigt wurde.

- für Produkte, die durch nicht autorisiertes Personal repariert wurden.

Die Garantie deckt Folgendes nicht ab:  
- Verschleißteile.

Die Garantie gilt nicht, wenn Cobi Rehab feststellt, dass der Tilt Dusch- und Toilettenstuhl unsachgemäß behandelt wurde oder in salzhaltigen, säurehaltigen oder basischen Umgebungen verwendet wurde.

Bei Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch werden sowohl der Service als auch die verwendeten Ersatzteile in Rechnung gestellt.

### 11.1 Unbeabsichtigtes Ereignis

Jeder Vorfall, der in Verbindung mit der Benutzung des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls auftritt, muss Cobi Rehab gemeldet werden.

### 11.2 Nach Ablauf der erwarteten Lebensdauer

Nach Ablauf der erwarteten Lebensdauer ist es wichtig, dass vor der weiteren Verwendung eine Gesamtprüfung des Produkts vorgenommen wird.

Nach Ablauf der erwarteten Lebensdauer kann Cobi Rehab keine Garantie für die Eignung und Sicherheit des Produkts übernehmen, da Cobi Rehab keinen Einfluss darauf hat, wie das Produkt verwendet und abgenutzt wird.

Die Gesamtbeurteilung des Zustands des Produkts muss von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden und es muss hierbei mindestens die Art der Verwendung des Produkts sowie der Zustand des Produkts und seiner Komponenten berücksichtigt werden.

Cobi Rehab kann jederzeit eine solche Prüfung durchführen.

## 12. Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Risikoklasse	I
Basis-UDI-DI	5740000100005N4
Erwartete Lebensdauer	7 Jahre
Erwartete Lebensdauer Akku	2-3 Jahre
Gesamtlänge in niedrigster Position	1400 mm
Gesamtbreite	740/850 mm
Sitzbreite	610 mm
Verstellbare Sitztiefe	420/480/540 mm
Elektrische Sitzneigung nach hinten	0-30°
Breite zwischen Standardarmlehnen/Butterfly-Armlehnen	610 mm/750 mm
Breite Toilettenöffnung	Ø 240 mm, 350 mm lang
Abstand vom Boden zur Sitzunterseite	445 mm
Abstand vom Boden bis zum Schiebebügel	1000 mm
Abstand vom Boden zu den Fußstützen	390/420/450/480 mm
Höhe vom Sitz bis zur Armlehne	220 mm
Gesamtgewicht des Tilt Dusch- und Toilettenstuhls	39 kg
Schwenkbare Armlehnen	Ja
Hochklappbare Fußstützen	Ja
Schwenkbare und höhenverstellbare Fußstützen	Ja
Kopfstütze	Ja
Feststellbare Räder	Ja, 4 Stück.
Auf-/Abwärts-Kapazität bei vollgeladenem Akku	Etwa 20-mal
Wenderadius	1580 mm
Rahmen	Pulverbeschichteter Chrom-Molybdän-Stahl
Räder	Ø 150 mm mit Bremse
Sitz/Rückenlehne/Armlehnen	Polyurethan
IP-Schutzart	IPX5
ISO-Klassifizierung	09 12 03 22
Vier Aktoren	Linak
Steuereinheit	Linak
Fernbedienung	Linak

Risikobewertung	EN/ISO 14971: 2012
Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren	EN 12182:2012, EN/ISO 10535:2006

## 13. Zubehör und Ersatzteile

Zubehör	Artikelnummer
Butterfly-Armlehne rechts (bietet 7 cm zusätzliche Breite zwischen den Armlehnen)	0150-999-012R
Butterfly-Armlehne links (bietet 7 cm zusätzliche Breite zwischen den Armlehnen)	0150-999-012L
Verstellbare Kopfstütze	0156-999-020
Sitz komplett mit Deckel für den Dusch- und Toilettenstuhl	0150-999-023
Steckbecken mit Deckel aus Kunststoff	0140-999-001
Fußstütze Standard Dusch- und Toilettenstuhl rechts	0156-999-090H
Fußstütze Standard Dusch- und Toilettenstuhl links	0156-999-090V
Seitliche Beinstütze für den Dusch- und Toilettenstuhl rechts	0156-999-030
Seitliche Beinstütze für den Dusch- und Toilettenstuhl links	0156-999-031
Akku für den Tilt Dusch- und Toilettenstuhl	0156-999-050



# COBI REHAB

---



## HÄNDLER UND HERSTELLER

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Dänemark  
+45 7025 2522

[cobirehab.com](http://cobirehab.com)