



PRODUKTARK

Cobi lejringspuder

Øg livskvaliteten hos immobile borgere med Cobi lejringspuder

Cobi lejringspuder er udviklet til lejrning af borgere inden for følgende patientkategorier: bariatri, demens, geriatri, neurologi, palliation og smerte.

Bruges på fx plejecentre, institutioner, hospice og i private hjem.



- Trykfordelende effekt.
- Anti-bakterielt forsejlet pudeoverflade.
- Mange lejringsmuligheder i hver enkel pude.
- Vaskbare betræk.
- Giver taktile og proprioceptive stimuli.
- Udviklet af Cobi Rehab i samarbejde med specialenheder inden for demens og neurologi.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Anvendelse

Cobi lejringspuder anvendes til lejrning af borgere med forskellige lejringsproblematikker.

Cobi lejringspuder er designet i samarbejde med specialenheder inden for demens og neurologi.

Cobi lejringspuder sikrer en trykfordelende og stabil positionering og anvendes dagligt på fx plejecentre, hospice og i private hjem.

Puderne er velegnede til lejrning af borgere inden for følgende patientkategorier:

- Bariatri
- Demens
- Geriatri
- Neurologi
- Palliation og smerte.

Fælles for disse mennesker er, at mange er i risikozonen for at udvikle vævsskade og tryksår.

Konstruktion

I udformningen af Cobi lejringspuder er der blandt andet lagt vægt på, at pudernes facon tillader en kropsnær placering ind til brugeren.

Pudernes tyngde er med til at sikre den kropsnære placering, fordi pudernes stabilitet gør, at puderne bliver, hvor de placeres, så positioneringen af brugeren forbliver stabil.

Puderne er fyldt med (små) Krøyer-kugler af ekspanderet polystyren, koldskum, viskoelastisk skum og SEBS-granulat. Der findes to typer betræk, et hygiejnebetræk og et jerseybetræk.

Begge betræk er åndbare, vaskbare, anti-bakterielt behandlede og strækbare.

Beroligende effekt

Udover at øge trykfordelingen kan puderne også bruges til mindskning af spasticitet og give taktile stimuli.

Taktil stimulering hjælper og har en betydning for fx demente, idet den afgrænsende fornemmelse af kroppen giver en beroligende effekt.

Rengøring og vedligeholdelse

Cobi lejringspuder kan tørres af med vand og et mildt rengøringsmiddel. Puderne kan også desinficeres med ethanol eller et klorprodukt.

Tilbehør som hygiejnebetræk og jerseybetræk kan vaskes ved 60°C og tørretumbles. Lynlåsen skal være lukket under vask.



Cobi U-pude under overkroppen. Cobi Cylinder pude under knæene. Cobi Finne pude under underben.



Stor Cobi hovedpude under underben og hæl.



Cobi Flexi pude langs forsiden af kroppen.

Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller på +45 **7025 2522** for bestilling eller for konkrete afprøvninger hos borgere med komplicerede lejringsproblematikker.

Cobi lejringspuder på HMI-basen




Cobi Finne pude
Str. 64x34x8 cm
HMI: 101222



Cobi H-pude
Str. 51x30x30 cm
HMI: 103835



Cobi Cylinder pude kort
Str. 75x25x25 cm
HMI: 101214

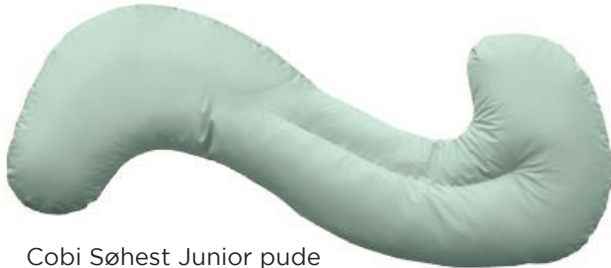


Cobi Søhest Junior pude
Str. 127x27x12 cm
HMI: 101282




Cobi Lille Hovedpude
Str. 39x25x8 cm
HMI: 103833



Cobi Stor hovedpude
Str. 53x38x12 cm
HMI: 101214

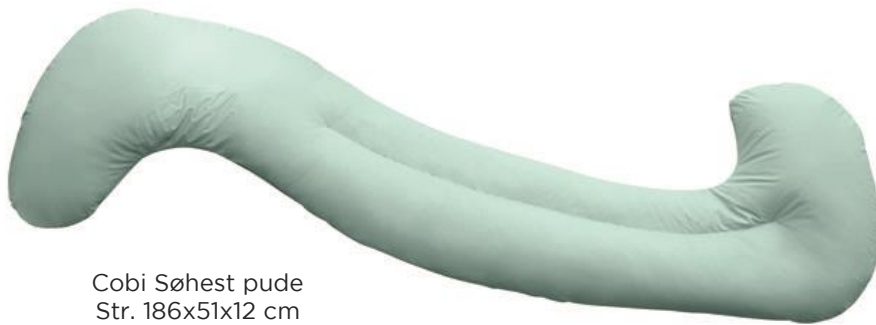

Cobi Søhest pude
Str. 186x51x12 cm
HMI: 101221

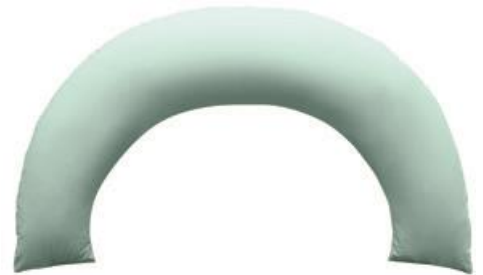

Cobi U-pude
Str. 88x94x17 cm
HMI: 101225



Cobi Hæl/arm pude
Str. 40x28x11 cm
HMI: 101218



Cobi Flexi pude
Str. 194x27x15 cm HMI: 101215



Cobi Robust pude
Str. 200x28x28 cm HMI: 101216



Cobi Skødepude
Str. 55x54x12 cm
HMI: 101226



Cobi Universal pude
Str. 58x39x22 cm
HMI: 101220



Cobi Kilepude
Str. 40x50x14 cm
HMI: 103836

Specifikationer

Fyldmateriale	EPS-kugler (ekspanderet polystyren). SEBS-granulat. Koldskum og viskoelastisk skum, der opfylder ØKO-TEX® Standard 100. Fordeling og indhold er tilpasset hver enkel pudetype.
Pudeoverflade	Åndbart og vandtæt. Polyamid imprægneret med PU og anti-bakterielt behandlet.
Hygiejnebetræk	Åndbart og vandtæt. Polyamid imprægneret med PU. Anti-bakterielt behandlet. Flammehæmmende.
Jerseybetræk	Bomuld (ØKO-TEX® Standard 100) og modakryl.
Rengøring	Begge betræk er vaskbare og tåler tumletørring. Lejringspuden tåler ikke maskinvask, men kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel eller desinficeres.
Opbevaring	Udsæt ikke puden for høj varme, langvarigt og intensivt sollys eller anden stråling.
ISO-klassifikation HMI-basen	09.07.06
Forventet levetid	2 år
Grundlæggende UDI-DI	5740000100014N5

Tilbehør

Model	Længde	Bredde	Højde	Vægt	Varenummer	HMI
Cobi lejringspudesæt komplet med taske					0400-000-000	
Cobi Cylinderpude pude kort	75 cm	25 cm	25 cm	1,7 kg	0400-064-000	101214
Cobi Flexi pude	194 cm	27 cm	15 cm	3,7 kg	0400-068-000	101215
Cobi Robust pude	200 cm	28 cm	28 cm	6 kg	0400-070-000	101216
Cobi Hæl og arm pude	40 cm	28 cm	11 cm	0,5 kg	0400-060-000	101218
Cobi Universal pude	58 cm	39 cm	22 cm	1,7 kg	0400-054-000	101220
Cobi Søhest pude	186 cm	51 cm	12 cm	5 kg	0400-056-000	101221
Cobi Søhest Junior pude	127 cm	27 cm	12 cm	2,5 kg	0400-057-000	101282
Cobi Finne pude	64 cm	34 cm	8 cm	0,6 kg	0400-058-000	101222
Cobi Finne Junior pude	60 cm	30 cm	8 cm	0,5 kg	0400-059-000	119567
Cobi U-pude	88 cm	94 cm	17 cm	2,7 kg	0400-072-000	101225
Cobi Skøde pude	55 cm	54 cm	12 cm	1,2 kg	0400-050-000	101226
Cobi Lille hovedpude	39 cm	25 cm	8 cm	0,3 kg	0400-048-000	103833
Cobi Stor hovedpude	53 cm	38 cm	12 cm	0,9 kg	0400-049-000	103834
Cobi H-pude	51 cm	30 cm	30 cm	1,8 kg	0400-074-000	103835
Cobi Kile pude	40 cm	50 cm	14 cm	1,1 kg	0400-066-000	103836
Cobi Arm pude, venstre	20 cm	7 cm	60 cm	0,9 kg	0400-052-000V	118949
Cobi Arm pude, højre	20 cm	7 cm	60 cm	0,9 kg	0400-052-000H	118948
Cobi T-pude str. 1	60 cm	16 cm	21 cm	0,8 kg	0400-090-000	140087
Cobi T-pude str. 2	74 cm	22 cm	21 cm	2 kg	0400-091-000	140090
Cobi T-pude str. 3	95 cm	26 cm	23 cm	2,7 kg	0400-092-000	140093



COBI REHAB



FORHANDLER OG FABRIKANT

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com