



## Joystick

På joysticket ses:

- en tænd- og slukknop
- en knop med et horn
- et display, som viser batterikapacitet, tidspunkt, hastighed, og kørselsprofil
- to knapper mærket med *Mode* og *Profile*
- en dobbeltknop, der styrer hastigheden.

Tryk på *Mode* for at skifte mellem kørsel og sæde- og rygjustering. Før styrepinden op eller ned for at styre tiltfunktionen.

Skub styrepinden til højre eller venstre for at skifte mellem tilt-in-space (0-45°) og kip (96-131°).

Brug tilt og recline funktionerne forsigtigt, så hurtige ryk undgås.

Der er tre kørselstyper: Maneuvering, Slow og Fast.

Maks. hastighed er 5 km i timen og maks. rækkevidde er 10 km.

Kørestolen **skal** oplades, når batteriindikatoren rammer det røde felt.

**Oplad til 100% hver dag uanset batteristatus.**

**Kørestolen oplader, når opladeren sluttes til bagsiden af joysticket og til strøm.**

⚠ Kørestolen kan ikke køre under opladning.

⚠ Hvis batteriet aflades fuldstændigt, går det i "beskyttelsesmode" i 3 dage og kan ikke bruges i perioden.

⚠ Garantien dækker ikke, hvis batteriet ikke oplades regelmæssigt som beskrevet ovenfor.

## Bremser

Bremserne er indbyggede i motoren (i hjulene). Det vil sige, når joysticket slippes, stopper kørestolen.

## Daglig rengøring af kørestolen

Kørestolens stel, sæde og armlæn rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Puderne kan fjernes og desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Joysticket desinficeres på samme måde som puderne.

Afmonter alle el-komponenter, før Cruise Power vaskes i vasketunnel.



Sidst redigeret 2024-11

## QUICK GUIDE

# Cobi Cruise Power bariatrisk komfortkørestol

## Guide til forflytning, elektriske funktioner og opladning.

### Fra seng til kørestol aktiv bruger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædevinkel justeres til brugers højde.
3. Bruger sætter sig i kørestolen.
4. Hoftevinkel justeres af bruger.
5. Fodstøtter svinges tilbage.

### Fra seng til kørestol passiv bruger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædevinkel justeres til brugers højde.
3. Hoftevinkel justeres på joysticket.
4. Tilt kørestolen godt tilbage.
5. Sving det ene armlæn tilbage.
6. Lift bruger ind fra siden.
7. Sving fodstøtter og armlæn tilbage.

### Tag kørestolen i brug

Vurdér om, der er behov for ekstra fyld i de ni rygmoduler, når bruger sidder i kørestolen.

Rygmodulerne finjusteres vha. FitGo drejeknap-systemet placeret på rygpladerne.

Drejeknappen aktiveres, når den trykkes ind. Skal knappen løsnes, trækkes den ud, så snoretrækket frigives.

### Flere justeringsmuligheder

Skubbebøjlen justeres vha. af et klikssystem.

Benstøtter kan indstilles i højde og position. Benstøtterne har også swing away funktion.

Fodpladen og benstøttens vinkel samt lægpladens vinkel kan justeres uden værktøj. Andre justeringer foretages med værktøj.



Scan QR-koden og find al information om Cobi Cruise komfort kørestol.