



PRÄSENTATION

Rollator King

Einer der stärksten Rollatoren auf dem Markt für bariatrische Patienten

- Benutzergewicht bis zu 325 kg
- Erhältlich in zwei Breiten, 61 cm und 71 cm
- Für den Transport zusammenklappbar
- Stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet große Sicherheit und Unterstützung für den Benutzer
- Massive Räder mit Stahlgabeln
- Gewicht nur 16 kg

1. Sitzfläche

Gepolsterter Ruhesitz zum Ausruhen unterwegs.

2. Bremsen

Die Bremsen an den Griffen dienen als Feststellbremse und als manuelle Bremse.

3. Sicherheitsrückenbügel

Der Rückenbügel sorgt dafür, dass der Benutzer richtig auf dem Ruhesitz positioniert ist. Dadurch wird ein Sturz nach hinten vermieden.



Starker und funktionaler Rollator, der für den bariatrischen Patienten entwickelt wurde.

Der Rollator King ist einer der stärksten Rollatoren auf dem Markt. Er passt zu Standard-Türöffnungen und lässt sich zur Aufbewahrung leicht zusammenklappen.

Konstruktion

Die sehr robuste und langlebige Konstruktion sowie die massiven Räder mit Stahlgabeln bieten dem Patienten große Sicherheit und Unterstützung.

Der Rollator King ist mit einem großen gepolsterten Sitz ausgestattet, auf dem Sie sich unterwegs ausruhen können.

Der Sicherheitsrückenbügel sorgt dafür, dass das Gewicht des Patienten gleichmäßig auf dem Sitz verteilt wird, wenn er als Ruhesitz verwendet wird. Dadurch wird das Risiko, nach hinten zu fallen, deutlich minimiert.

Der gepolsterte Sitz und der Sicherheitsrückenbügel können ausgetauscht werden, wenn der Rollator an einen neuen Patienten übergeben wird.

Bremsen

Der Rollator King ist mit stabilen Bremsen ausgestattet, die entweder als Feststellbremse oder als manuelle Bremse fungieren können. Die beiden Arten von Bremsen sorgen für Kontrolle und sicheres Manövrieren.

Der Rollator King wird mit einem Korb (Gewichtskapazität 5 kg) und Griffen mit angebrachten Reflektoren geliefert.

Transport in einem motorisierten Fahrzeug

Für den Transport in einem motorisierten Fahrzeug lässt sich der Rollator King leicht zusammenfallen.

Soll der Rollator weniger Platz einnehmen, können Korb und Sicherheitsrückenbügel abgenommen werden.

Größen

Rollator King ist in zwei Breiten erhältlich, 61 cm und 71 cm. Die Zahl bezieht sich auf die Öffnung zum Sitz und entspricht dem Abstand zwischen den Griffen.

Beide Modelle haben eine Sitzbreite von 51 cm, eine Sitzhöhe von 51 cm und eine Sitztiefe von 37 cm.

Die Gesamtbreite der beiden Modelle beträgt 13 cm mehr als der Abstand zwischen den Griffen.

Pflege

Der Rahmen, der Sitz, die Griffe und der Sicherheitsrückenbügel des Rollators können mit Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.

Technische Daten			
Benutzergewicht max.	325 kg	Sitzhöhe	500 mm
Gesamtlänge	850 mm	Gewicht	16 kg
Gesamtbreite	740/840 mm	Räder	8" massives PU
Breite zwischen den Griffen	610/710 mm	Rahmen	Stahl, SAE4130
Höhenverstellbar in Stufen von 25 mm	770 - 990 mm	Sitz- und Rückenpolster	Polyurethan
Sitzbreite	510 mm	Sitz und Rückenbügel austauschbar	Ja
Sitztiefe	370 mm		

Kontaktieren Sie Cobi Rehab für eine kostenlose Vorführung oder einen Test.

+45 7025 2522 oder cobi@cobi.dk