



PRODUKTBLATT

# Bariatrisches Komfort-Rollstuhlkissen

**In Dänemark entwickeltes Standard-Rollstuhlkissen zur Vorbeugung von Druckgeschwüren bei bariatrischen Benutzern.**

Das Komfort-Rollstuhlkissen ist für Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 325 kg ausgelegt.



- Zur Vorbeugung von Druckgeschwüren
- Speziell für bariatrische Benutzer entwickelt
- Viskoelastische Oberseite
- Dehnbarer Inkontinenzbezug
- Tragfähigkeit bis zu 325 kg



## Rollstuhlkissen zur Vorbeugung von Druckgeschwüren

Das Komfort-Rollstuhlkissen ist ein Standard-Rollstuhlkissen zur Vorbeugung von Druckgeschwüren bei bariatrischen Benutzern bis 325 kg.

Das Komfort-Rollstuhlkissen wird in Rollstühlen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Privathaushalten verwendet.

### Vor der Verwendung

Legen Sie das Komfort-Rollstuhlkissen so in den Rollstuhl oder Stuhl, dass der Reißverschluss nach unten zeigt. Prüfen Sie, ob der Reißverschluss des Bezugs des Komfort-Rollstuhlkissens richtig geschlossen ist.

⚠ Legen Sie keine zusätzlichen Schichten oder Polsterungen zwischen das Kissen und den Benutzer, da dies die Wirkung des Kissens verringern kann.

### Konstruktion

Das Komfort-Rollstuhlkissen besteht auf der Oberseite aus einer drei Zentimeter dicken viskoelastischen Schaumstoffschicht. An der Unterseite befindet sich eine Heavy-Duty-PUR-Schaumschicht, die so zurechtgeschnitten ist, dass sie eine federnde Wirkung hat.

Das patentierte Federungssystem sorgt dafür, dass der Druck über eine größere Fläche verteilt wird, was die Druckentlastung erhöht.

Der mitgelieferte Inkontinenzbezug ist aus Dartex-Material gefertigt. Der Inkontinenzbezug ist atmungsaktiv, antibakteriell behandelt und flammhemmend.

### Reinigung und Wartung

Das Komfort-Rollstuhlkissen kann nicht in der Waschmaschine gewaschen werden.

Der Inkontinenzbezug kann mit Wasser und mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel gereinigt werden. Der Bezug kann auch bei 60 °C in der Waschmaschine gewaschen und im Trockner getrocknet werden.

### Desinfektion

Das Komfort-Rollstuhlkissen kann auch mit z. B. einem feuchten Wet Wipe 70 %, einem chlorhaltigen Produkt mit einer Chlorkonzentration von 1000–1200 ppm (z. B. Wet Wipe Chlorine Disinfection) oder ECA (100 ppm) desinfiziert werden.

Desinfizieren Sie das Komfort-Rollstuhlkissen vor jedem Benutzerwechsel. Dadurch wird eine Kreuzkontamination vermieden.

### Langfristige Aufbewahrung

Das Komfort-Rollstuhlkissen sollte dunkel und bei Temperaturen zwischen -10 °C und +50 °C aufbewahrt werden.

### Während dem Gebrauch

Überprüfen Sie das Rollstuhlkissen regelmäßig, um sicherzustellen, dass das Kissen und der Bezug richtig ausgerichtet sind und dass das Kissen nicht nass oder defekt ist.

⚠ Ein nasses oder defektes Komfort-Rollstuhlkissen kann die Wirksamkeit der Vorbeugung von Druckgeschwüren verringern und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen.

# Technische Daten

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Gewicht	2 kg
Sitzbreite	550/610/660/720/820 mm
Sitztiefe	450 mm
Sitzhöhe	120 mm
Kissenunterseite	HD-PUR-Schaum und viskoelastischer PUR-Schaum
Inkontinenzbezug	Dartex
ISO-Klassifizierung	18 10 06 01
Lebenserwartung des Produkts	3 Jahre
Risikoklasse	I
Basis-UDI	5740000100011MX
Gebrauchsanleitung und Produktblatt sind auf der Website verfügbar und können für sehbehinderte Benutzer auf eine große Schriftgröße skaliert werden.	

## Bestellung und Ersatzteile

Modell	Breite cm	Tiefe x Höhe in cm	Artikelnummer
Bariatrisches Komfort-Rollstuhlkissen Inkontinenzbezug	55	45 x 12	0230-055-045
Komfort-Rollstuhlkissen mit Inkontinenzbezug	61	45 x 12	0230-061-045
Komfort-Rollstuhlkissen mit Inkontinenzbezug	66	45 x 12	0230-066-045
Komfort-Rollstuhlkissen mit Inkontinenzbezug	72	45 x 12	0230-072-045
Komfort-Rollstuhlkissen mit Inkontinenzbezug	82	45 x 12	0230-082-045
Inkontinenzbezug (Ersatz)	55		0230-055-001
Inkontinenzbezug (Ersatz)	61		0230-061-001
Inkontinenzbezug (Ersatz)	66		0230-066-001
Inkontinenzbezug (Ersatz)	72		0230-072-001
Inkontinenzbezug (Ersatz)	82		0230-082-001