



BRUGERVEJLEDNING

# Bariatrisk Albuestok

**Stærk og funktionel albuestok udviklet til den bariatriske bruger.**

Albuestok er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

# Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaring.....	4
3. Generelt .....	5
4. Anvendelse.....	5
5. Indstilling .....	5
6. Langtidsopbevaring .....	6
7. Rengøring og vedligeholdelse .....	6
8. Bortskaffelse.....	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer .....	8
11. Bestilling.....	8

# 1. Sikkerhed

---



## ADVARSEL

Albuestok må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Albuestok. Ved forkert anvendelse kan bruger lide skade.

Brugervejledningen skal læses grundigt, før Albuestok tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af Albuestok.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis Albuestok er beskadiget eller har mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader eller u hensigtsmæssige situationer, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.



## SIKKERHEDSVEJLEDNINGER










Albuestok må kun indstilles af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Albuestok. Forkert indstilling kan skade brugeren.


Albuestok kan knække eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer over 325kg.

Albuestok må ikke benyttes før clipsen til højdeindstilling er trykket helt på plads. Inderrøret kan løsne sig, hvis ikke clipsen sidder korrekt. Det kan betyde, at inderrøret falder ned i yderrøret.

Manglende kontrol af clips til højdeindstilling, som anvist kan forårsage funktionsfejl.

## 2. Symbolforklaring

Følgende symboler findes i brugervejledningen eller på produktets label.	
	Advarsel!
	Overensstemmelseserklæring ifølge Direktivet for medicinsk udstyr, EU 2017/745
	Cobi varenummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
	Medicinsk udstyr, klasse 1
	Brugervægt
	Læs manual
CE-Label er placeret på Albuestoks rør. Eksempel på label kan ses herunder.	

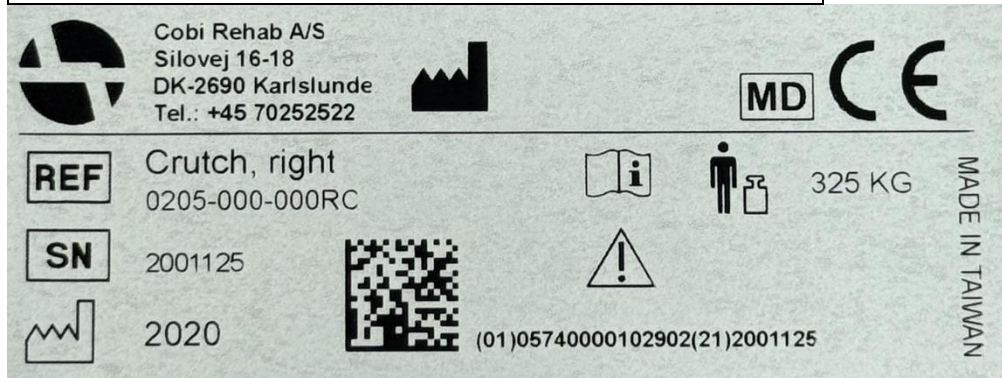

Cobi Rehab A/S  
Silovej 16-18  
DK-2690 Karlslunde  
Tel.: +45 70252522

MD CE

REF 0205-000-000RC

SN 2001125

2020

(01)05740000102902(21)2001125

325 KG

MADE IN TAIWAN

## 3. Generelt

---

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Albuestok. Brugervejledningen indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes produktarket i PDF-form på [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Albuestok.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.


Albuestoks UDI-nummer fremgår af labelen på Albuestok.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

## 4. Anvendelse

---

Albuestok er en ekstra forstærket stok, specielt udviklet til at yde støtte og sikkerhed under gang for brugere, der vejer op til 325 kg.

 Albuestok kan knække eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer over 325 kg.

Albuestok bruges på hospitaler, i plejeboliger og i private hjem. Albuestok kan bruges både indendørs og udendørs.

Konsulter altid en terapeut før Albuestok anvendes til en bruger.

### Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen af Albuestok.

## 5. Indstilling

---

Albuestok højdeindstilles ved at fjerne clipsen og sætte stokkebenets inderrør i ønsket position, stikke clipsens pind gennem hullerne og derefter trykke clipsen på plads.

Albuestok må ikke bruges, før clipsen til højdeindstilling er trykket helt på plads.

Inderrøret kan løsne sig, hvis ikke clipsen sidder korrekt. Det kan betyde, at inderrøret kan glide ned i yderrøret.

## 6. Langtidsopbevaring

---

Albuestok bør opbevares mørkt og i temperaturer mellem -10° - 50° C.

## 7. Rengøring og vedligeholdelse

---

Albuestok kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Clips og den gennemgående pind skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt.

⚠ Manglende kontrol af clips, som anvist kan forårsage funktionsfejl.

### Desinficering

Albuestok kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

⚠ Desinficer altid Albuestok, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Eventuelle lokale procedurer omkring rengøring og vedligeholdelse skal altid overholdes.

## 8. Bortskaffelse

---

Når Albuestok ikke længere er i brug, skal den bortskaffes på miljøforsvarlig vis.

Kontakt Cobi Rehab eller kommunen for yderligere information om bortskaffelse.

## 9. Garanti

---

Cobi Rehab garanterer, at Albuestok er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på Albuestok ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Albuestok er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt.
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale.

Garantien omfatter ikke:  
- sliddele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Albuestok er blevet håndteret på en u hensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres både service og anvendte reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art.

⚠ Mangel på vedligeholdelse kan skade Albuestok, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Albuestok ydeevne.

### 9.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af albuestokken, skal indberettes til Cobi Rehab.

### 9.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi Rehab ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi Rehab ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum

skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

## 10. Specifikationer

Maksimum brugervægt	325 kg
Højdejusterbar	68-110 cm
Vægt	1,5 kg
Refleks	Ja
Underarmsstøtte	15 cm
Håndgreb	14 cm
Anatomisk håndtag	Ja
Materiale	Krom molybdæn stål/SAE41-30
Greb	Nylon med fibre
ISO - klassifikation	ISO 12 03 06 - 04
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102889/5740000102896/5740000102902
Grundlæggende UDI	5740000100010MV
Overfladetemperaturen på Albuestok kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

## 11. Bestilling

Model	HMI-nummer	Varenummer
Bariatrisk Albuestok med universal håndgreb	51996	0205-000-000C
Bariatrisk Albuestok med anatomisk håndgreb højre	83607	0205-000-000RC
Bariatrisk Albuestok med anatomisk håndgreb venstre	83609	0205-000-000LC





# COBI REHAB

---



**FABRIKANT OG FORHANDLER**

**Cobi Rehab**  
Silovej 16-18  
DK-2690 Karlslunde  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)