



GEBRAUCHSANLEITUNG

Rollator King

Starker und funktionaler Rollator, der für den bariatrischen Benutzer entwickelt wurde.

Der Rollator ist für Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 325 kg ausgelegt. Der Rollator kann im Außen- und Innenbereich von Einrichtungen, Pflegezentren und Privathaushalten eingesetzt werden. Erhältlich in zwei Breiten, 61 cm und 71 cm.



Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit	3
2. Symbolerklärung	4
3. Allgemeines.....	5
4. Anwendung.....	5
5. Montage	6
6. Einstellung	6
7. Rollator Support.....	7
8. Reinigung und Wartung	8
9. Entsorgung.....	8
10. Garantie.....	9
11. Spezifikationen.....	10
12. Bestellung	11
13. Zubehör	11

1. Sicherheit



WARNUNG

Der Rollator King darf nicht ohne gründliche Einweisung durch geschultes Personal oder durch Personen, die im Umgang mit dem XXL-Rehab Rollator King unterwiesen wurden, verwendet werden. Durch falsche Verwendung können Benutzer zu Schaden kommen.

Die Gebrauchsanleitung muss vor der Benutzung des Rollator King sorgfältig gelesen werden. Beachten Sie insbesondere die mit  gekennzeichneten Sicherheitshinweise.

Cobi Rehab übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden am Produkt oder für Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Rollator King entstehen.

Kontaktieren Sie Cobi Rehab umgehend, wenn der Rollator beschädigt ist oder Mängel aufweist. Verwenden Sie niemals eigene Ersatzteile.

Cobi Rehab kann nicht für Schäden oder unangemessene Situationen verantwortlich gemacht werden, die durch Reparaturen entstehen, die ohne die schriftliche Genehmigung von Cobi Rehab durchgeführt wurden.



SICHERHEITSHINWEISE

Aktivieren Sie die Bremsen des Rollators, bevor Sie ihn als Ruhesessel benutzen.

Benutzen Sie den Rollator niemals auf Rolltreppen oder gewöhnlichen Treppen.

Benutzen Sie den Rollator niemals als Rollstuhl.

Benutzen Sie den Rollator niemals zum Transportieren großer Gegenstände. Transportieren Sie nur Dinge, die in den Korb passen.

Benutzen Sie den Rollator niemals auf Oberflächen mit einer Neigung von mehr als 3,5 Grad.


Benutzen Sie den Rollator niemals auf weichem oder unebenem Untergrund.

Denken Sie immer daran, die Handmuttern für die Höhenverstellung festzuziehen.

Halten Sie beide Füße auf dem Boden, wenn der Rollator als Ruhesessel verwendet wird. Das sorgt für Stabilität. Gehen Sie mit dem Rollator auch nicht vorwärts oder rückwärts, während er als Ruhesessel verwendet wird.

2. Symbolerklärung

Die folgenden Symbole finden Sie in der Gebrauchsanleitung oder auf dem Produktetikett.	
	Warnung!
	Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte
IP31	Leitfaden für Schutzarten
	Cobi-Artikelnummer
	Seriennummer
	Produktionsjahr
	Hersteller
	Medizinprodukte, Klasse 1
	Benutzergewicht
	Konsultieren Sie die Gebrauchsanleitung
TBA	Wird später veröffentlicht
Die CE-Kennzeichnung befindet sich am unteren Rahmen des Rollators. Ein Beispiel für diese Kennzeichnung ist unten zu sehen.	

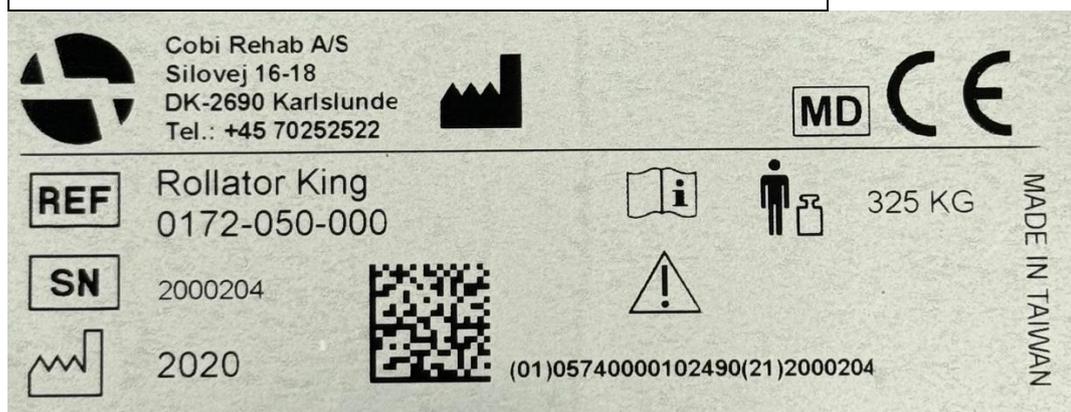

3. Allgemeines

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen über die Zielgruppe und den Gebrauch des Rollator King. Die Gebrauchsanleitung enthält auch eine Liste mit den Spezifikationen.

Die aktuellste Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie auf unserer Website. Prüfen Sie, ob die jetzt vorliegende Version die neueste ist.

Wenn Sie eine Gebrauchsanleitung in einer größeren Schriftgröße benötigen, steht Ihnen das Produktblatt im PDF-Format auf cobirehab.com zur Verfügung, bei dem die Schriftgröße skalierbar ist.

Wenn Sie weitere Informationen über den Rollator King wünschen, können Sie sich jederzeit unter der Telefonnummer +45 7025 2522 oder über cobi@cobi.dk an Cobi Rehab wenden.

Cobi Rehab behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die UDI-Nummer des Rollator King ist auf dem Etikett des Rahmens angegeben.

Produktsicherheitshinweise und Produktrückrufe finden Sie auf der Website <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

4. Anwendung

Der Rollator King darf nur von mobilen Nutzern verwendet werden, die über die physischen und kognitiven Fähigkeiten verfügen, das Gehen und Bremsen sicher zu kontrollieren.

Der Rollator ist für Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 325 kg ausgelegt. Der Rollator kann im Außen- und Innenbereich von Einrichtungen, Pflegezentren und Privathaushalten eingesetzt werden.

 Benutzen Sie den Rollator King niemals auf weichem oder unebenem Untergrund.

 Achten Sie darauf, dass der Benutzer mit dem Rollator immer so nah wie möglich am Körper geht. Ein zu großer Abstand zwischen Körper und Rollator kann zu Instabilität beim Gehen führen.

Lassen Sie sich immer von einem Therapeuten beraten, bevor Sie einem Benutzer einen Rollator King zuweisen.

Kontraindikationen

Es gibt keine Kontraindikationen für die Verwendung des Produkts als Rollator oder Ruhesessel.

4.1 Weitere Verwendung

Rollator King ist in zwei Breiten erhältlich, 61 cm und 71 cm. Die Zahl bezieht sich auf die Öffnung zum Sitz und entspricht dem Abstand zwischen den Griffen.

Beide Modelle haben eine Sitzbreite von 51 cm, eine Sitzhöhe von 51 cm und eine Sitztiefe von 37 cm.

Die Gesamtbreite der beiden Modelle beträgt 13 cm mehr als der Abstand zwischen den Griffen.

Bitte beachten Sie, dass Modelle mit einer Gesamtbreite von 84 cm möglicherweise nur schwer durch bestimmte Türöffnungen passen.

Wahl des Modells für den Benutzer

Die Wahl des Modells hängt von der Körperform des Benutzers ab. Für Benutzer mit viel Fülle an Becken und Oberschenkeln empfehlen wir eine Größe von 71 cm. Kontaktieren Sie uns unter +45 7025 2522 oder cobi@cobi.dk, um sich vor Bestellung beraten zu lassen.

Den Benutzer immer im Stehen messen. Legen Sie z. B. ein Buch oder etwas Ähnliches auf jede Seite des Benutzers, an die Stelle, wo dieser am breitesten ist. Messen Sie dann den Abstand zwischen den beiden Büchern.

5. Montage

Neben dem Rollator enthält die Box auch zwei Griffe (mit Kabeln am Rollator befestigt), einen Korb und einen Sicherheitsrückenbügel.

1. Falten Sie den Rollator auseinander.
2. Entfernen Sie die Schrauben zur Höhenverstellung von der Griffstange.
3. Befestigen Sie die Stangen am Rollator.
4. Bringen Sie den Sicherheitsrückenbügel an der Vorderseite des Rollators an, indem Sie den Knopf an der rechten und linken Seite hochziehen.

Der Knopf kann arretiert werden, um die Montage des Bügels zu erleichtern. Dazu ziehen Sie den Knopf nach oben und drehen ihn eine Vierteldrehung.

Denken Sie daran, den Knopf wieder zu lösen, damit der Sicherheitsrückenbügel fixiert ist.

5. Der Einkaufskorb wird vorne montiert, indem die beiden Haken am Oberrohr unter dem Sitz platziert werden.

6. Passen Sie die Höhe der Griffe an den Benutzer an.

7. Stellen Sie die Bremsen ein.

⚠ Verwenden Sie den Rollator nicht ohne angebrachten Sicherheitsrückenbügel.

Der Sicherheitsrückenbügel sorgt dafür, dass die Last auf dem Rollator nicht zu weit vorne platziert wird. Ist dies der Fall, kann der Rollator nach vorne kippen.

⚠ Legen Sie keine zusätzlichen Kissen auf den gepolsterten Sitz, wenn der Rollator in Gebrauch ist.

6. Einstellung

Einstellung der Höhe der Griffe

1. Entfernen Sie die Höhenverstellungsschrauben und den Drehknopf an beiden Griffen, damit sich der Griff frei nach oben und unten bewegen lässt.
2. Schieben Sie die Griffe nach oben oder unten, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Setzen Sie die Schraube und den Drehknopf wieder ein. Setzen Sie die Schraube auf der Rückseite so ein, dass sie in das Loch passt.
3. Festziehen.

Achten Sie darauf, dass beide Griffe die gleiche Höhe haben. Eine ungleichmäßige Höhe kann zu Instabilität beim Fahren führen.

⚠ Achten Sie darauf, dass der Benutzer den Rollator beim Vorwärtsschieben so nah wie möglich am Körper hat. Daher ist es wichtig, dass die Breite zwischen den Griffen Raum für die Körperform des Benutzers lässt.

So wird der Rollator zusammengefaltet

1. Fassen Sie die Vorderkante des Sitzes (die Ihnen am nächsten liegende Vorderkante) mit einer Hand. Halten Sie mit der anderen Hand einen der Griffe fest.
2. Heben Sie den Sitz an.
3. Der Rollator faltet sich nun zusammen.

Soll der Rollator noch weniger Platz einnehmen, können Korb und Sicherheitsbügel abgenommen werden.

Benutzung der Bremsen

Der Rollator King kann auf zwei Arten bremsen:

1. Kurzfristiger Halt:

Drücken Sie beide Bremshebel nach oben.

2. Längerer Halt:

Drücken Sie beide Bremshebel nach unten, sodass sie in einer unteren Position einrasten. Die Bremshebel bleiben in dieser Position, bis sie wieder aktiv nach oben gedrückt werden

Inspektion der Bremsen

Die Bremsen sind bei Lieferung korrekt eingestellt.

Die Bremsen und die Feststellbremse müssen vor Gebrauch überprüft werden.

Wenn die Feststellbremse nicht arretieren kann oder die Bremsen nicht richtig funktionieren, kontaktieren Sie Cobi Rehab unter +45 7025 2522.

Die Bremsen müssen alle 3 Monate einer Inspektion unterzogen werden.

6.1 Transport in einem motorisierten Fahrzeug

Für den Transport in einem motorisierten Fahrzeug lässt sich der Rollator King leicht zusammenfalten.

1. Greifen Sie mit einer Hand an die Vorderkante des Sitzes. Halten Sie mit der anderen Hand einen der Griffe fest.

2. Heben Sie den Sitz an und falten Sie nun den Rollator zusammen.

Soll der Rollator weniger Platz einnehmen, können Korb und Sicherheitsrückenbügel abgenommen werden.

 Der Rollator King darf nicht als Sitz in einem motorisierten Fahrzeug verwendet werden.

6.2 Aufbewahrung (inkl. langfristiger Aufbewahrung)

Der Rollator King sollte an einem dunklen Ort aufbewahrt und mit einer Decke oder Ähnlichem abgedeckt werden.

Der Rollator King sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 50°C aufbewahrt werden.

Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass der Rollator während der Aufbewahrung nicht nass geworden ist oder andere Schäden erlitten hat.

7. Rollator Support

Der Rollator Support ähnelt im Aufbau dem Rollator King. Einziger Unterschied sind die höhenverstellbaren Unterarmstützen, die dem Benutzer helfen, den Rollator in aufrechter Position vorwärts zu bewegen, während die Unterarmstützen die Handgelenke entlasten.

Benötigt der Benutzer für kürzere oder längere Zeit Unterarmstützen, können diese am Rahmen des Rollator King befestigt werden. Wenden Sie sich an Cobi Rehab, um weitere Informationen zur Montage von Unterarmstützen zu erhalten.

HINWEIS: Der Wechsel zu Unterarmstützen ist nur möglich, wenn der Benutzer weniger als 200 kg wiegt.

Die Artikelnummer der Unterarmstützen von Cobi Rehab finden Sie im Abschnitt **Zubehör**.



8. Reinigung und Wartung

8.1 Reinigung und Desinfektion

Rahmen, Sitz, Griffe, und Sicherheitsrückenbügel des Rollators müssen mit Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel gereinigt werden.

Desinfektion

Der Rahmen, der Sitz, die Griffe und der Rückenbügel des Rollators können auch mit z. B. Wet Wipe 70 % oder einem chlorhaltigen Produkt mit einer Chlorkonzentration von 1000–1200 ppm (z. B. Wet Wipe Chlorine Disinfection) desinfiziert werden.

Der Ruhesitz und der Rückenbügel können bei einem Benutzerwechsel ausgewechselt werden.

⚠ Desinfizieren Sie den Rollator King bei jedem Benutzerwechsel. Dies ist wichtig, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

⚠ Etwaige lokal geltende Vorschriften zur Reinigung und Wartung sind unbedingt einzuhalten.

8.2 Wartung

Schrauben und Muttern müssen alle drei Monate überprüft werden. Ziehen Sie sie bei Bedarf fest.

Kontaktieren Sie Cobi Rehab für die weitere Wartung des Rollator King.

⚠ Eine mangelnde Wartung von Schrauben und Muttern kann zu Fehlfunktionen führen.

9. Entsorgung

Wenn der Rollator King nicht mehr in Gebrauch ist, muss er umweltgerecht entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Cobi Rehab oder Ihre Gemeinde, um weitere Informationen zur Entsorgung zu erhalten.

Recycling

Teile des Rollator King können recycelt werden. Kontaktieren Sie Cobi Rehab für weitere Informationen.

10. Garantie

Cobi Rehab gewährleistet, dass der Rollator King bei der Lieferung frei von Mängeln ist. Sollte der Rollator King zum Zeitpunkt der Lieferung wider Erwarten Mängel aufweisen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Cobi Rehab.

Die Garantiezeit für den Rollator King beträgt ein Jahr ab Kaufdatum und deckt Fabrikationsfehler oder Mängel zum Zeitpunkt der Lieferung ab. Die Rechnung dient als Garantienachweis.

Die Garantie gilt nicht:

- für Produkte, bei denen die Seriennummer, Chargennummer o. ä. entfernt oder wesentlich beschädigt wurde.

- für Produkte, die durch nicht autorisiertes Personal repariert wurden.

Die Garantie deckt Folgendes nicht ab:
- Verschleißteile.

Die Garantie gilt nicht, wenn Cobi Rehab feststellt, dass der Rollator King unsachgemäß behandelt wurde.

Bei Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch werden sowohl der Service als auch die verwendeten Ersatzteile in Rechnung gestellt.

Cobi Rehab kann nicht für Schäden jeglicher Art haftbar gemacht werden.

 Wartungsmängel können zu einer Beschädigung des Produkts, einer Verkürzung seiner Haltbarkeit oder einer Beeinträchtigung seiner Leistung führen.

10.1 Unbeabsichtigtes Ereignis

Jeder Vorfall, der in Verbindung mit der Verwendung eines Rollator King auftritt, muss Cobi Rehab gemeldet werden.

10.2 Nach der erwarteten Lebensdauer

Nach Ablauf der erwarteten Lebensdauer ist es wichtig, dass vor der weiteren Verwendung eine Gesamtprüfung des Produkts vorgenommen wird.

Nach Ablauf der erwarteten Lebensdauer kann Cobi Rehab keine Garantie für die Eignung und Sicherheit des Produkts übernehmen, da Cobi Rehab keinen Einfluss darauf hat, wie das Produkt verwendet und abgenutzt wird.

Die Gesamtbeurteilung des Zustands des Produkts muss von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden und es muss hierbei mindestens die Art der Verwendung des Produkts

sowie der Zustand des Produkts und seiner Komponenten berücksichtigt werden.

Cobi Rehab kann jederzeit eine solche Prüfung durchführen.

11. Spezifikationen

Allgemeines Modell 61 cm und 71 cm	
Maximales Benutzergewicht	325 kg
Gesamtlänge	850 mm
Gesamtbreite	740/840 mm
Breite zwischen den Griffen	610/710 mm
Höhenverstellbar in Stufen von 2,5 cm	770,5-990 mm
Sitzbreite	510 mm
Sitztiefe	370 mm
Öffnung zum Sitz	610/710 mm
Sitzhöhe	510 mm
Gewicht	15,7 kg
Gewicht im Korb max.	5 kg
Zusammenklappbar	Ja
Massive Räder	Ja
Rahmen	Stahl/SAE4130
Rahmen und Sitz	Flammhemmend
Sitz- und Rückenpolster	Polyurethanschaum
Räder	8" massiv
Erwartete Lebensdauer	7 Jahre
ISO-Klassifizierung	ISO 12 06 06 - 11
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102490 (61 cm) / 5740000102506 (71 cm)
Basis-UDI	5740000100007N8
Die Oberflächentemperatur des Rollator King kann steigen oder fallen, wenn der Rollator äußeren Kälte- und Wärmeeinflüssen ausgesetzt ist.	

12. Bestellung

Modell	Öffnung zum Sitz	Gesamtbreite	Artikelnummer
Rollator King 61 cm, inkl. Korb	610 mm	740 mm	0172-050-000
Rollator King 71 cm, inkl. Korb	710 mm	840 mm	0172-071-000

13. Zubehör

Zubehör	Artikelnummer
Rollator Support Unterarmstützen-Set	0170-999-010



COBI REHAB



HERSTELLER UND HÄNDLER

Cobi Rehab
Silovej 16-18
DK-2690 Karlslunde
Dänemark
+45 7025 2522
cobirehab.com